


Langkah-langkah cara menggunakan hydrapep

1

Isi Hydrapep dengan air bersih sampai setinggi 10cm sesuai dengan gambar petunjuk.

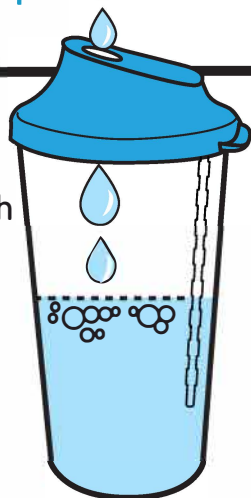


2

Masukkan pipa melalui lubang tutup botol sampai dengan ujung akhir dari pipa menyetuh permukaan dasar botol.



PERHATIAN:
Pastikan lubang di pipa dengan corong pipa yang dimasukkan kedalam mulut **JANGAN** posisi berjejer atau bertumpukkan. (Sesuai dengan gambar)

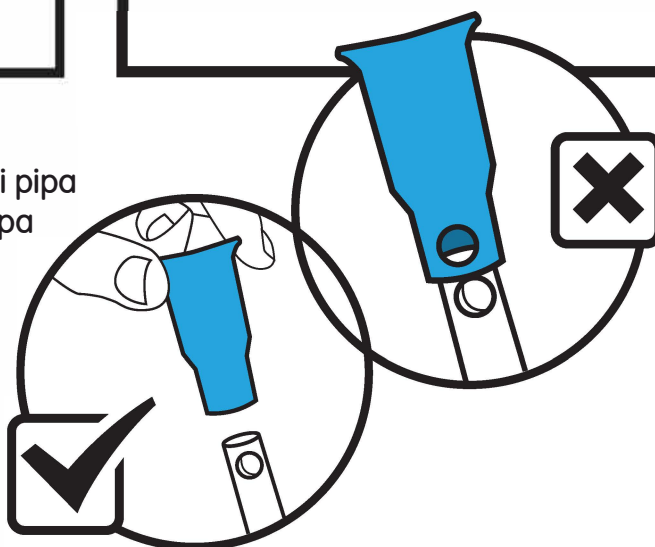

3

Tarik napas dalam, Kemudian masukkan corong pipa ke dalam mulut, dan sambil meniup balon udara di dalam air selama 5 detik. Lakukan ini selama 10 kali.



4

Batukkan, kemudian istirahat selama 1-2 menit.

5

Ulangi langkah No.3 dan langkah No.4 sebanyak 1 sampai 2 kali.

6

Lakukan program ini sebanyak 3 kali dalam sehari.

PERHATIAN: Berhenti jika anda merasa pening atau pusing.

Ganti air diantara setiap tahap, dan bersihkan Hydrapep setiap hari. Hydrapep aman jika dimasukkan ke dalam mesin pencuci piring.

Tolong perhatikan cara penggunaan yang benar sesuai dengan petunjuk mulai dari cara pemasangan alat, cara penggunaan, tindakan pencegahan dan kontraindikasi (kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan medis tertentu karena bahaya yang akan didapatkan dari pasien..) Selalu baca petunjuk penggunaan. Hanya di gunakan sesuai dengan petunjuk. Jika gejala terus berlangsung, mohon segera untuk menemui dokter atau petugas kesehatan yang berwenang.

A Resolve
Healthcare
Product

RII Resolve
Healthcare
www.resolvehealthcare.com.au